

**UNE PERSONNE SEMBLE VICTIME D'UN MALAISE CARDIAQUE**  
**STARKER VOUS PERMET D'INTERVENIR**  
**EN INDIQUANT ORALEMENT LA MARCHE A SUIVRE :**  
**A PERSON SEEMS TO BE VICTIM OF A CARDIAC ARREST (HEART ATTACK)**  
**STARKER PROVIDES SIMPLE ORAL INSTRUCTIONS ENABLING YOU**  
**TO CARRY OUT ESSENTIAL PROCEDURES**


- 1 - APPELLEZ IMMÉDIATEMENT LE NUMÉRO D'URGENCE**  
**1 - CALL THE EMERGENCY NUMBER IMMEDIATELY**
- 2 - ÉLOIGNER LA VICTIME D'UN ENDROIT HUMIDE**  
**2 - TAKE THE VICTIM AWAY FROM ANY WET PLACE**
- 3 - ENLEVER LES VÊTEMENTS COUVRANT LE TORSE DE LA VICTIME**  
**3 - PULL AWAY THE CLOTHES COVERING THE CHEST**
- 4 - ESSUYER LE TORSE DE LA VICTIME**  
**SI LA VICTIME EST POILUE, UTILISER LE RASOIR DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS**  
**LES ÉLECTRODES DOIVENT ÊTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU**  
**4 - WIPE THE TORSO.**  
**IF THE VICTIM IS HIRSUITE, USE THE SHAVER PROVIDED IN THE FIRST AID KIT**  
**ELECTRODES (PADS) MUST BE IN CONTACT WITH THE SKIN**



- 5 - SORTIR LES ÉLECTRODES ADULTES DE LEUR SACHET**  
**LES BRANCHER SUR L'APPAREIL**  
**POUR UN ENFANT DE 1 À 8 ANS, PESANT MOINS DE 25KG**  
**UTILISER LES ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES**  
**5 - TAKE THE ADULT ELECTRODES (PADS) OUT OF THE SACHET**  
**CONNECT THEM TO THE APPLIANCE**  
**FOR CHILDREN FROM 1 TO 8 YEARS OF AGE, LESS THAN 25 KG**  
**USE PEDIATRIC ELECTRODES (PADS) ALSO PROVIDED**

- 1 POSER LES ÉLECTRODES SUR LE TORSE**  
**RESPECTER LES POSITIONS INDIQUEES SUR LE DESSIN**  
**ELECTRODE DROITE "RA" SUR LA POITRINE DROITE**  
**ELECTRODE GAUCHE "LL" SOUS LA POITRINE GAUCHE CÔTE COEUR**

**!! ATTENTION !!**  
**POSE DES ÉLECTRODES**  
**PÉDIATRIQUES**

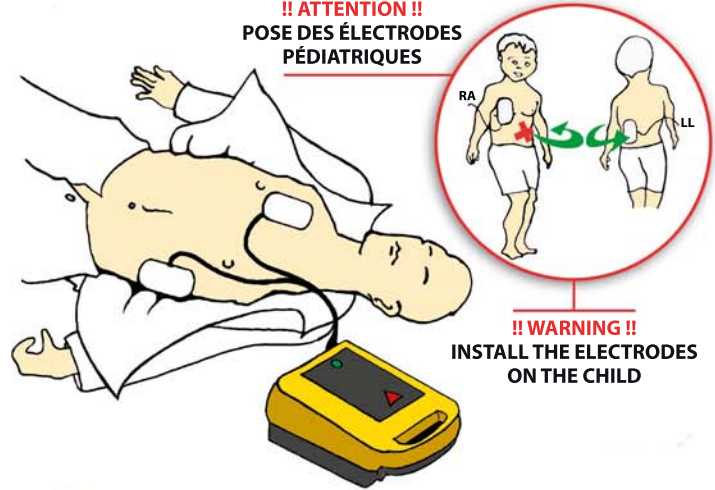

**!! WARNING !!**  
**INSTALL THE ELECTRODES**  
**ON THE CHILD**

- 1 INSTALL THE ELECTRODES (PADS) ON THE CHEST,**  
**RESPECT THE POSITIONS INDICATED ON THE DRAWING:**  
**PAD RIGHT "RA" ON THE RIGHT CHEST**  
**PAD LEFT "LL" UNDER THE CHEST HEART SIDE**

- 2 APPUYER SUR LE BOUTON VERT**  
**NE PAS TOUCHER LA VICTIME**  
**L'ANALYSE DURE QUELQUES SECONDES**  
**STARKER PARLE POUR INDIQUER LA MARCHE A SUIVRE.**



- 2 PRESS THE GREEN BUTTON**  
**DO NOT TOUCH THE VICTIM**  
**THE ANALYSIS TAKES A SHORT MOMENT**  
**STARKER TALKS FOLLOW INSTRUCTIONS**

- 3 SI LE BOUTON ROUGE "CHOC" CLIGNOTE**  
**NE PAS TOUCHER LA VICTIME**  
**PUIS APPUYER SUR LE BOUTON ROUGE "CHOC"**  
**STARKER DELIVRE LA PREMIERE CHARGE ELECTRIQUE**



- 3 THE RED BUTTON "SHOCK" STARTS FLASHING.**  
**DO NOT TOUCH THE VICTIM**  
**PRESS THE "SHOCK" RED BUTTON**  
**STARKER DELIVERS THE FIRST ELECTRIC LOAD.**

- 4 PROCÉDER AU MASSAGE CARDIAQUE MANUEL**  
**PAR COMPRESSIONS SUR LE TORSE**  
**SUIVRE LE RYTHME INDICÉ PAR STARKER SELON LES BIPS**



- 4 PROCEED TO MANUAL HEART MASSAGE**  
**BY COMPRESSIONS OF CHEST**  
**STARKER INDICATES RHYTHM BY BIPS.**

- 5 PROCÉDER AU BOUCHE À BOUCHE**  
**SUIVRE LE RYTHME INDICÉ PAR STARKER SELON LES BIPS**  
**STARKER PROCÉDE A UNE NOUVELLE ANALYSE**  
**SI LE BOUTON ROUGE CLIGNOTE**  
**REPETER LES ACTIONS DEPUIS LE PICTO 3**



- 5 PROCEED TO MOUTH-TO-MOUTH**  
**STARKER INDICATES RHYTHM BY BIPS**  
**STARKER PROCEEDS IN A NEW ANALYSIS**  
**IF THE RED BUTTON FLASHES**  
**REPEAT THE ACTIONS (SHARES) SINCE THE PICTOGRAM 3**